

QuikRead® CRP predplnené kyvety

Návod na použitie



1

Načítajte kartu.



2

Otvorte kyvetu.



3

Vsuňte piestik do kapiláry, odoberte pacientovi 20 µl krvi (po bielu zátku), piestikom ju vytlačte do kyvety s pufrom.



4

Kyvetu uzavrite viečkom s čínidlom, pretrepávajte (nie dnom nahor) až do vyčírenia roztoku. Potom vložte kyvetu do meracieho otvoru a odmerajte blank (asi 20 sekúnd).



5

Pridajte číidlo stlačením vnútornej modrej časti viečka.



6

Kyvetu vyberte a dôkladne miešajte prudkým trepaním dnom nahor podľa tempa na displeji až do pípnutia.



7

Ihneď po pípnutí vložte kyvetu nazad do meracieho otvoru. Za 1 minútu sa na displeji objaví výsledok.

Viac informácií
nájdete v návode
na použitie.

POC

QuikRead® CRP predplnené kyvety

Skladovanie reagensíí



Neotvorená krabica kitu

Skladujte pri 2-8°C do dátumu expirácie kitu.



Neotvorený stojanček s kvetami v sekundárnom obale (hliníkovom vrecku)

Skladujte pri 2-25°C do dátumu expirácie kitu.



Neotvorené kyvety vybraté z hliníkového vrecka

Skladujte pri 2-8°C:
6 mesiacov od vybratia z vrecka

Skladujte pri 18-25°C:
3 mesiace od vybratia z vrecka



Tuba s viečkami s činidlom

Skladujte pri 2-8°C: do dátumu expirácie kitu

Skladujte pri 18-25°C: 1 mesiac

Skladujte pri 18-25°C
(7,5 hodiny denne): 3 mesiace



Otvorená kyveta

Test musí byť vykonaný do dvoch hodín od otvorenia kyvety. Pred vykonaním testu nechajte pufer v kyvete zahriať na izbovú teplotu.

Viac informácií nájdete na: www.quikread.sk

QuikRead®